

STGWAX Fixadent

Cores:

Rosa claro translucida - RC

Rosa médio translúcida - RM

Rosa vermelho translúcida - RV

Intensivo marrom - IM

Intensivo roxo - IR

Intensivo preto - IP

Intensivo vermelho veias - VV

Intensivo vermelho - IV

Intensivo dentina opaca – DO



Bossa: região de isquemias (volume ósseo que envolve a raiz na região de gengiva inserida)

Camada: porções de cores intercaladas que recuperam o volume vestibular.

Fina camada: cor intensiva bem diluída aplicada sobre a camada anterior

Finíssima camada: cor intensiva bem diluída sobre a camada anterior em menor quantidade que a fina camada.

Escultura: executar recortes, simulando anatomia gengival

OBS: antes de iniciar a escultura verificar, se a espessura está aceitável.

Veias e vasos: pode ser aplicada veias artificiais ou promover ranhuras com um bisturi na região de mucosa alveolar, e aplicar finíssima camada da cor intensiva indicada na escala (vermelho ou roxo), após o resfriamento remover o excesso até ficar aparente as vascularizações.



Caracterização: 1 Rosa Normal Transparente

Base: RC

Bossa: DO

Camada: RC/RM/RV

Esculpir

Aplicar veias vermelhas

Caracterização: 2 Rosa Claro

Base: RC

Bossa: DO

Camada: RC/RM

Esculpir

Caracterização: 4 Rosa Normal

Base: RM

Bossas: DO

Camada: RM/RC/RV

Esculpir

Aplicar veias vermelhas

Caracterização: 5 Rosa Avermelhada

Base: RM

Bossa: Mistura de IM/DO

Camada: RM/RC

Escupir

Aplicar veias roxas e vermelhas

Caracterização:8 Rosa Vermelho Amarronzado

Base: RC

Finíssima camada: IM

Camada: RM/RC/IM

Finíssima camada: IM

Esculpir

Aplicar veias vermelhas

Caracterização: 10 Rosa Arroxeado

Base: RC/RV/RM

Bossa: discretíssimos pontos de IR

Camada: RC/RV/RM

Esculpir

Aplicar veias roxas

Caracterização: 13 Rosa Preto

Base: RC

Finíssima camada: IP

Finíssima camada: IM

Camada: RV/RC/IM

Esculpir

Aplicar veias vermelhas

Caracterização: 14 Variação do Rosa Normal

Base: RV

Finíssima camada: IP

Finíssima camada: IM

Camada: RC/RM/IM

Finíssima camada: IM

Esculpir

Aplicar veias vermelhas

Caracterização: 15 Rosa Chumbo

Base: RV

Finíssima camada: IP

Finíssima camada: IM

Bossa: DO

Camada: RM/RC

Esculpir

Aplicar veias vermelhas

Caracterização: 16 Rosa Claro Arroxeado

Base: RM

Finíssima camada: IR

Bossa: DO

Camada: RC/RM/RV

Esculpir

Aplicar veias vermelhas

Caracterização: 2 A Rosa Claro Avermelhado

Base: RM

Fundo de vestíbulo e alguns pontos: Mistura de RM/IV/IM

Bossa: DO

Camada: RC/RM

Fundo de vestíbulo e alguns pontos: Mistura de RM/IV/IM

Esculpir

Caracterização: 6 A Rosa Claro Arroxeado

Base: RC

Bossa: DO

Fundo de vestíbulo e alguns pontos: Mistura de IV/IM

Camada: RC/RM

Fundo de vestíbulo e alguns pontos: Mistura de IV/IM

Escupir

Caracterização: 8 A Rosa Amarronzado

Base: RV

Fina camada: IM

Fundo de vestíbulo e alguns pontos: Mistura 1/3 IR + 3 partes IM

Camada: RV/RC/RM/IM

Fundo de vestíbulo e alguns pontos: Mistura 1/3 IR + 3 partes IM

Esculpir

Caracterização: 14 A Variação Rosa Normal

Base: RV

Finíssima camada: IM

Fundo de vestíbulo e alguns pontos: Mistura de VV+IM

Camada: RM/RC/RV

Fundo de vestíbulo e alguns pontos: Mistura de VV+IM

Esculpir